

AUTOMATICKÝ DIGITÁLNY TLAKOMER NA RAMENO

orava

TL-100

Návod na obsluhu/Záruka

SK



25.10.2017 rev.1.0

CE 0598

TL-100

Určený účel použitia zariadenia

Toto zariadenie je digitálny monitor určený na meranie krvného tlaku a pulzu dospelých pacientov, ktorí dokážu porozumieť tomuto návodu na použitie, s obvodom hornej končatiny v rozsahu vytlačenom na manžete. Zariadenie počas merania zisťuje nepravidelný srdcový tep a vydáva varovný signál s výsledkom merania. Je určený najmä na všeobecné domáce používanie.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA



VAROVANIE!

Indikuje potenciálne rizikové situácie, ktoré by mohli mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

Všeobecné aspekty

- Ak chcete používať toto zariadenie počas tehotenstva vrátane preeklampsie, alebo ak máte diagnostikovanú arytmiu alebo artériosklerózu, porozprávajte sa so svojím lekárom.
- Zariadenie nepoužívajte na meranie na zranenom alebo liečenom ramene.
- Manžetu nenasadzujte na rameno, do ktorého je zavedená infúzia a takisto ani počas transfúzie krvi.
- Pred použitím tohto zariadenia na rameno s artériovenóznym premostením (A-V) sa porozprávajte so svojím lekárom.

- Toto zariadenie naraz nepoužívajte s inými zariadeniami ME.
- Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí VF chirurgických zariadení, MRI, skenera CT ani v prostredí s vysokým podielom kyslíka.
- Zariadenie nenechávajte bez dohľadu. Vzduchová hadička na kábli sieťového adaptéra môže spôsobiť zadusenie novorodenca alebo malého dieťaťa.
- Zástrčku vzduchovej hadičky, kryt priestoru na batérie ani batérie nenechávajte bez dohľadu. Ak novorodenec náhodne prehltnie uvedené predmety, hrozí riziko udusenía.
- Budte pod stálym dohľadom lekára. Vlastná diagnostika vychádzajúca z domácich meraní a súvisiaca svojpomocná liečba je nebezpečná.
- Osoby so závažnými problémami s prietokom krvi alebo so všeobecnými problémami s krvou by sa mali obrátiť na lekára predtým, než použijú toto zariadenie, pretože nafúknutie ramennej manžety môže spôsobiť menšie vnútorné krvácanie a následnú krvnú podliatinu.
- Ak sa počas merania vyskytnú akékoľvek abnormality, snímte manžetu.
- Toto zariadenie nepoužívajte na meranie tlaku krvi novorodencov, dojčiat alebo osôb, ktoré nedokážu vyjadriť svoje úmysly.
- Manžetu nenafukujte na vyšší tlak, než je nevyhnutné.
- Toto zariadenie nepoužívajte na žiadne iné účely než na meranie tlaku krvi.
- Používajte len manžetu určenú pre toto zariadenie. Používanie iných manžiet môže pri meraní poskytovať nesprávne výsledky.
- V blízkosti tohto zariadenia nepoužívajte mobilný telefón ani iné zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické polia. Mohlo by to spôsobiť poruchu činnosti zariadenia.
- Monitor ani manžetu nerozoberajte.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani na miestach, kde môže zariadenie postriekať voda. Mohlo by to poškodiť zariadenie.

- Toto zariadenie nepoužívajte v pohybujúcom sa dopravnom prostriedku (v aute, v lietadle).
- Nevykonávajte vyšší než požadovaný počet meraní. V opačnom prípade hrozí riziko vnútorného krvácania v dôsledku narušenia prietoku krvi.
- Ak ste absolvovali mastektómiu, obráťte sa na svojho lekára.

Používanie sieťového adaptéra (voliteľný)

- Ak sa zariadenie alebo sieťový prívod poškodí, sieťový adaptér prestaňte používať. Ihneď zariadenie vypnite a odpojte sieťový prívod.
- Šnúru sieťového adaptéra zapojte do zásuvky s určeným napätím. Nepoužívajte rozvodku. Sieťový prívod nikdy nezapájajte a neodpájajte od zásuvky sieťového napájania mokrými rukami.
- Úplne zasunite zástrčku.
- Pri odpájaní zástrčky neťahajte za napájací kábel. Napájací kábel chyťte za zástrčku. Pri manipulácii s napájacím káblom dodržiavajte nasledujúce pravidlá:
Nepoškodte ho.
Nelámte ho.
Nezasahujte doň.
Nasilu ho neohýbajte ani neťahajte.
Neskrúcajte ho.
Počas používania ho nezmotávajte.
Nepřicviknite ho.
Nedávajte ho pod ťažké predmety.
- Zo zástrčky utrite prach.
- Keď sa zariadenie nebude dlhý čas používať, odpojte zástrčku. Pred začatím údržby odpojte zástrčku.
- Pre toto zariadenie používajte výhradne predpísaný sieťový adaptér určeného typu. Používanie iných adaptérov môže spôsobiť poškodenie zariadenia a môže byť nebezpečné.

Dôležité bezpečnostné informácie

Činnosť s napájaním z batérií

- Batérie nevkladajte do zariadenia s nesprávnou orientáciou polaritu.
- V tomto zariadení používajte iba 4 alkalické alebo mangánové batérie typu „AA”. Nepoužívajte iné typy batérií. Súčasne nepoužívajte nové a staré batérie.
- Ak zariadenie nebudete tri mesiace alebo dlhšie používať, vyberte z neho batérie.

Všeobecné upozornenia

- Manžetu ani vzduchovú hadičku násilne ani nadmerne neohýbajte.
- Vzduchovú hadičku nestláčajte.
- Ak chcete odpojiť vzduchovú zástrčku, neťahajte za hadičku, ale za vzduchovú zástrčku na pripojení k monitoru.
- Dbajte na to, aby na monitor a manžetu nepôsobili silné úder a vibrácie a aby nespadli.
- Ak nie je manžeta obtočená okolo ramena, nenafukujte ju.
- Toto zariadenie nepoužívajte v inom než určenom prostredí. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnych výsledkov.

ČO ROBIŤ PRI VYSOKOM KRVNOM TLAKU?

- Zmeňte spôsob života, vytvorte si svoj vlastný rebríček hodnôt tak, aby na prvom mieste bolo zdravie.
- Znížte psychický stres - zredukujte priveľký počet aktivít, nevykonávajte ich naraz viac, vyhýbajte sa časovej tiesni, majte vždy dostatočnú časovú rezervu pri dodržiavaní termínov. Zvýšte si podporu najbližšieho okolia najmä v rodine, u priateľov a kolegov.
- Zvýšte relaxačné aktivity - zaradte si do svojho programu pravidelné prechádzky, pasívny odpočinok a dostatok spánku, teplé a perličkové kúpele, autorelaxačné techniky, rekreačný šport, nestresujúce hobby.
- Zaradte si do svojho týždňového programu najmenej 3x 40 minút vytrvalostného cvičenia (rýchlu chôdzu, plávanie, cyklistiku, beh na lyžiach) pri pulzovej frekvencii 50-70% maxima, pri súčasnom výskyte iných chorôb podľa odporúčania lekára.
- Nefajčite.
- Znížte v potrave obsah soli, vyhýbajte sa jedlám a nápojom s vysokým obsahom soli, akými sú napr. údeniny, konzervované a instantné jedlá alebo niektoré minerálne vody.
- V potrave uprednostňujte jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov, hlavne ovocie, surovú a sparenú zeleninu, celozrnné výrobky, nízкотučné mliečne výrobky (syry s obsahom tuku v sušine menej ako 30 %), znížte príjem živočíšnych tukov (maslo, žĺtka, červené mäso a výrobky z neho), zvýšte príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážajte, nefritujte, varte na pare. Pri nadváhe redukuje kalorický príjem a zvýšte energetický výdaj.

- Pri vysokom príjme alkoholu znížte jeho konzumáciu na denne maximum 2 - 3 dl vína, alebo 0,3 - 0,5 l piva, alebo 0,04 dl destilátu.
- Zmeny v životospráve robte postupne, nie všetky naraz. Sústreďte sa na jednu alebo dve zmeny a až po ich dosiahnutí a fixovaní sa zamerajte na ďalšie.
- Pravidelne si doma merajte krvný tlak v rovnaký čas ráno a večer, z nameraných hodnôt vypočítajte priemerné hodnoty. Cieľom je dosiahnutie priemerných hodnôt nižších alebo rovných 135/85 mmHg. Používajte iba tlakomery schváleného typu.

ÚVOD

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou automatického elektronického prístroja na meranie tlaku krvi na ramene TL-100. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Činnosť prístroja je založená na oscilometrickom princípe s tzv. „fuzzy aritmetikou“ na meranie krvného tlaku, pomocou ktorého sa dosahuje vysoká presnosť a opakovateľnosť. Integrovaný silikónový senzor tlaku sa používa na zabezpečenie dlhodobej stability. Hákovanie, vypúšťanie a rýchle vypúšťanie sú plne automatické a za účelom zvyšovania presnosti nameraných výsledkov a zníženia času merania sa kontroluje konštantná rýchlosť vypúšťania. Prístroj je praktický, má dokonalý tvar a nízku hmotnosť.

UPOZORNENIE!

Pred uvedením zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod.

Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

Podrobnejšie informácie o svojom krvnom tlaku získate OD SVOJHO LEKÁRA.

Tento návod a produkt nenahrádzajú lekársku starostlivosť a rady. Tento návod ani produkt nie je možné používať na liečebné postupy a považovať ich za formu zdravotnej pomoci. V prípade zdravotných problémov musíte ihneď kontaktovať svojho lekára.

Používanie tlakomera

Tlakomer merá ľudský systolický, diastolický krvný tlak a pulz na tepne v ramene.

Používa oscilometrickú meraciu metódu.

Odporúčame, aby prístroj používali len osoby staršie ako 18 rokov. Prístroj je určený na domáce použitie. Nie je určený na profesionálne klinické používanie.

INFORMÁCIE O KRVNOM TLAKU

Krvný tlak

Srdce pracuje podobne ako pumpa a celý čas pumpuje krv, ktorá preteká tepnami. Výsledkom je tlak krvi na steny tepien. Pri výtoku krvi zo srdca hovoríme o systolickom tlaku a pri návrate krvi do srdca hovoríme o diastolickom tlaku.

Kolívanie krvného tlaku

Krvný tlak je počas dňa kolísavý. Jeho hodnota je počas dňa vyššia než večer. Najnižšia hodnota je okolo polnoci. Krvný tlak začína narastať znova okolo 3. hodiny ráno a počas dňa dosiahne svoju najvyššiu hodnotu, takže nie je možné namerať zakaždým rovnaké údaje.

Poznatky o krvnom tlaku

Existuje množstvo faktorov, napríklad telesné pomery alebo problémy s meraním, ktoré môžu ovplyvniť krvný tlak. Niektoré osoby môžu byť napríklad nervózne pri návšteve lekára, čo spôsobuje zvýšenie ich krvného tlaku. Tento prípad je dobre známy ako „hypertenzia bielych plášťov“. Náhodné merania neurčujú celkovú úroveň krvného tlaku a preto nie je dôvod na strach pri izolovaných vyšších alebo nižších hodnotách tlaku. Najdôležitejšou vecou je sledovať vývoj svojho krvného tlaku dlhodobým meraním. V západných krajinách si ľudia merajú krvný tlak doma a výsledky odovzdávajú svojmu lekárovi, aby tak mohli lepšie posúdiť svoj vysoký a nízky tlak. Základné hodnoty môžete získať meraním počas niekoľkých dní v rovnakú dennú dobu. Tieto údaje sa nazývajú „základný krvný tlak“.

Priemerné hodnoty obvyklého artériového krvného tlaku (mmHg)

Vek	Muži	Ženy
	Systolický/diastolický tlak	Systolický/diastolický tlak
11 - 15	114/72	109/70
16 - 20	115/73	110/70
21 - 25	155/73	110/71
26 - 30	115/75	112/73
31 - 35	117/76	114/74
36 - 40	120/80	116/77
41 - 45	124/81	122/78
45 - 50	128/82	128/79
51 - 55	134/84	134/80
56 - 60	137/84	139/82
61 - 65	148/88	145/83

Hypertenzia

Hypertenziu môžu spôsobovať rôzne kardiovaskulárne choroby, ochorenia obličiek a endokrinopatia. Dlhodobá hypertenzia môže viesť k patologickým zmenám srdca, mozgu a obličiek. Tieto zmeny môžu viesť k hypertenzným komplikáciami známym ako „skrytí zabijaci“.

Podnet

Hypertenzia je jednou z civilizačných chorôb a jej patológia nie je dodnes objasnená. Kľúčovým problémom hypertenzie je prevencia, napríklad jesť menej slané jedlá, viac zeleniny a ovocia, nefajčiť a venovať viac pozornosti vyváženej strave atď.

Prečo si merať tlak?

Domáce meranie krvného tlaku odporúčame ako preventívny prostriedok i ako štandardný doplnok liečby hypertenzie u Vášho lekára. Výhoda domáceho merania krvného tlaku spočíva v tom, že svoj krvný tlak môžete sledovať pravidelne v danom čase a v normálnych každodenných podmienkach. Tým sa vyhnete nebezpečenstvu umelého zvýšenia hodnôt spôsobeného nervozitou v cudzom prostredí lekárskej ordinácie (tzv. ordinčná hypertenzia, efekt bieleho pláňa atď.).

Krvný tlak si ľudia môžu odmerať aj sami

Zistiť presne, aký má človek krvný tlak, nie je jednoduché. Meranie samo síce nie je náročné, ale tlak nesmierne kolíše, mení sa doslova s každým úderom srdca po fyzickej či psychickej námahe - tou môže byť napríklad práve návšteva ordinácie. Tlak nameraný v ambulancii je obvykle o niečo vyšší ako ten, ktorý má pacient normálne. Tlak je obvykle najnižší v spánku, ráno stúpa, najvyšší je doobeda, po obede klesá. U niekoho opäť ešte na večer mierne stúpne. Rozdiel nemusí byť len medzi časťami dňa, obvyklé je aj to, že sa líši tlak nameraný na oboch rukách.

Riešenie? Častejšie meranie.

Lekári, v snahe zistiť skutočný tlak, radia svojim pacientom, potenciálnym hypertonikom, častejšie meranie. Optimálne by bolo, keby lekár pri jednej návšteve monitoroval tlak trikrát a za bernú mincu vzal priemer z výsledkov druhého a tretieho merania.

Iným riešením je domáce meranie, či už príležitostné, či dvadsaťštyrihodinový monitoring. Avšak i vedomie monitoringu môže u niekoho tlak zvyšovať nad obvyklý normál. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby sa toto monitorovanie vykonávalo

niekoľkokrát počas šiestich mesiacov, ak existuje podozrenie na hypertenziu. Chce tak predísť zbytočnému podávaniu liekov niekomu, kto ich vlastne nepotrebuje.

Kto má v úmysle sám si merať tlak doma, mal by sa vyvarovať klasického ortuťového prístroja. Obsah jedovatej ortuti, taktiež aj náročnosť merania by mala byť dostatočným argumentom, prečo od jeho kúpy ustúpiť.

Pravidelné každodenné meranie tlaku

K meraniu tlaku mimo ordinácie lekára má mnoho ľudí závažný dôvod. Vyšší krvný tlak predstavuje riziko celého radu nebezpečných komplikácií, ale subjektívne ho nikto nepociťuje. Takzvané automeranie, teda meranie tlaku mimo ordinácie lekára pacientom samým, má obrovský význam v predchádzaní týmito komplikáciami - napríklad infarktu myokardu, mozgovej cievnej príhode a mnohým ďalším.


Je vykonávanie automerania krvného tlaku obtiažne?

Nie, vôbec nie. Elektronické prístroje na meranie krvného tlaku na paži a na zápästí majú natoľko jednoduchú obsluhu, že pri ich používaní možno len veľmi ťažko urobiť chybu. Sú teda veľmi vhodné na automeranie ako doma, tak i na cestách alebo v kancelárii. Na získavanie porovnateľných hodnôt je však potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá: tlak merajte vždy v rovnakú dennú dobu, po desiatich minútach kludnej pozície v sede. Berte na vedomie, že namerané hodnoty ovplyvňujú také okolnosti ako fajčenie alebo pitie kávy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA

- O meraní tlaku sa poraďte so svojím lekárom.
- Krvný tlak sa mení! Ovplyvňuje ho množstvo rôznych faktorov ako fajčenie, konzumácia alkoholu, lieky a fyzická aktivita. Minimálne 30 minút pred začatím merania tlaku krvi nejedzte, nefajčite a necvičte.
Pred začatím merania tlaku krvi nepite.
- Stres zvyšuje tlak krvi, preto meranie nevykonávajte v stresových podmienkach.
- Pred začatím merania tlaku krvi odpočívajte minimálne 5 minút.
- Pri meraní obviňte manžetu okolo zápästia.
Odporúča sa nasadiť manžetu prístroja na meranie krvného tlaku na ľavé zápästie.
- Počas merania prístrojom netraste. Inak namerané údaje nemusia byť správne. Meranie sa má vykonávať na tichom mieste, mali by ste byť v pohodlnej sediacej polohe s nohami na podlahe. Ľavé rameno nechajte spočívať na stole s dlaňou otočenou smerom nahor tak, aby bola manžeta na rovnakej úrovni ako srdce.
- Počas merania zostaňte v klude a nerozprávajte.
- Manžetu neobvívajte okolo oblečenia.
Meranie nebude správne.
- Ľudia, ktorí sú zdravotne postihnutí (diabetici, obličkári, arteriosklerotici a pod.), by mali namerané hodnoty konzultovať s lekárom a informovať sa o ich presnosti.

POPIS PRÍSTROJA

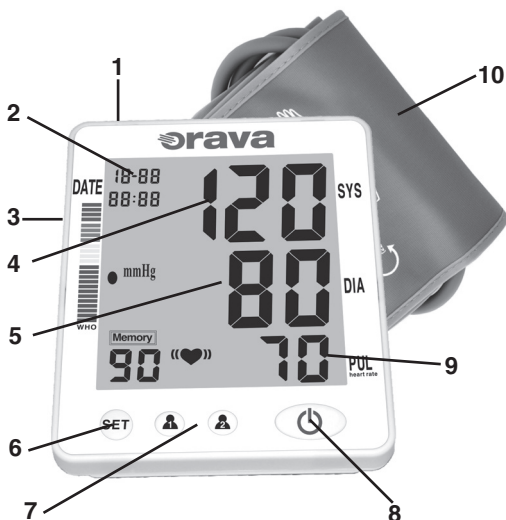

1 Napájací mikroUSB konektor

2 LCD displej

3 Prípojka vzduchovej hadičky

4 Stupnica pre systolický tlak

5 Stupnica pre diastolický tlak

6 Tlačidlo SET (nastavenie hodín)


7 Tlačidlá   (vyvolanie z pamäte/zobrazenie hodín/osoba 1/osoba 2)

8 Tlačidlo  (zapnutie/vypnutie)

9 Stupnica pre pulz

10 Manžeta na rameno

POPIS DISPLEJA

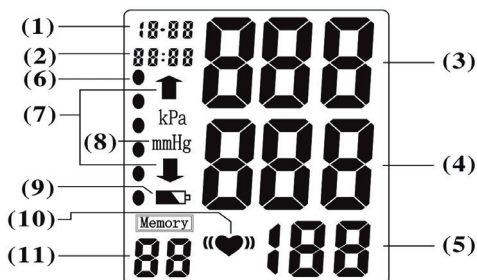

- 1 Dátum: mesiac - deň
- 2 Čas: hodiny - minúty
- 3 Stupnica pre systolický tlak
- 4 Stupnica pre diastolický tlak
- 5 Stupnica pre pulz
- 6 Klasifikácia tlaku
- 7 Indikátor nafukovania/sfukovania
- 8 Jednotky tlaku
- 9 Indikátor slabých batérií
- 10 Indikátor arytmie
- 11 Poradové číslo pamäte merania


VLOŽENIE/VÝMENA BATÉRIÍ

1. Kryt priestoru pre batérie odsuňte v smere šípky.

2. Vložte alebo vymeňte 4 alkalické batérie 1,5 V (veľkosť „AA“).

Dodržiňte správnu polaritu + a - na batériách s označením vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zasuňte kryt batérie späť na pôvodné miesto.

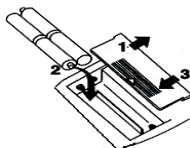

Poznámky

- Ak sa na displeji objaví indikátor slabých batérií, vymeňte všetky batérie. Odporúčajú sa alkalické batérie s dlhodobou životnosťou.
- Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho všetky batérie.
- Nepoužívajte v zariadení nabíjateľné batérie (1,2 V). Nie sú vhodné pre tento prístroj a môžu poškodiť displej.

NAPÁJANIE ZARIADENIA Z USB SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA (nedodávaný)

Zariadenie je možné napájať aj cez vstupný napájací mikroUSB (1). Ako zdroj je potrebné použiť USB sieťový napájač s výstupným napätím 5 V/500 mA. Napájač a tlakomer prepojte vhodným USB káblom.

NASTAVENIE PRÍSTROJA

Nastavenie dátumu a času

1 Zatlačte a pridržte tlačidlo SET na cca 5 sekúnd, keď je zariadenie vypnuté. Začne blikať číslica pre rok.

Stláčaním  a  nastavte rok.

2 Stlačte tlačidlo SET. Začne blikať číslica pre mesiac.

Stláčaním  a  nastavte mesiac.

3 Znova stlačte tlačidlo SET. Začne blikať číslica pre deň.

Stláčaním  a  nastavte deň.

4 Znova stlačte tlačidlo SET. Začne blikať číslica pre hodinu.

Stláčaním  a  nastavte hodinu.

5 Znova stlačte tlačidlo SET. Začne blikať číslica pre minútu.

Stláčaním  a  nastavte minúty.

6 Ďalším stlačením tlačidla SET zobrazíte štandardné zobrazenie. Zobrazí sa nastavený aktuálny dátum a čas v 24-hodinovom formáte.

NASADENIE MANŽETY NA RAMENO

- 1** Z ľavého ramena si vyzlečte tesné oblečenie alebo uvoľníte tesný vyhrnutý rukáv.
Manžetu nenasadzujte na hrubý odev.
- 2** Riadne zasunúť vzduchovú hadičku do prípojky vzduchovej hadičky.
- 3** Podržte ľavú ruku dlaňou smerom nahor.
Riadne si nasadíte manžetu na ľavé rameno.
Spodný okraj manžety by mal byť 2 až 3 cm nad vnútornou stranou lakťa. Vzduchová hadička má byť na vnútornej strane hornej končatiny a zarovnaná s Vaším prostredníkom.
- 4** Oviňte manžetu pohodlne okolo ramena. Vrchný a spodný okraj musia rovnomerne priliehať k Vášmu ramenu.
- 5** Po správnom nasadení manžety na rameno ju zabezpečte pevným spojením a zalepením suchého zipsu.




POLOHA PRE SPRÁVNE MERANIE

Pre meranie je veľmi dôležitá správna poloha.

Ked' sa rozhodnete zmerať si tlak, pohodlne sa usadíte do miestnosti s príjemnou izbovou teplotou a uvoľnite sa. 30 minút pred meraním sa nekúpte, nepite alkoholické a kofeínové nápoje, nejedzte, nefajčite a fyzicky sa nenamáhajte.

- 1 Posadíte sa na stoličku tak, aby ste mali chodidlá na podlahe.
Sadnite si rovno tak, aby ste mali chrbát vzpriamený.
- 2 Sadnite si tak, aby ste si opreli chrbát a hornú končatinu.
Položte ľavú ruku na stôl dlaňou smerom nahor a lakeť oprite o stôl.
- 3 Ľavú ruku nechajte spočívať na stole dlaňou otočenou smerom nahor tak, aby bola manžeta na ramene na rovnakej úrovni ako srdce.

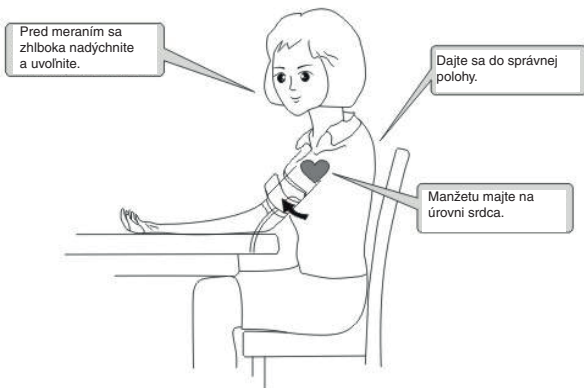

MERANIE A ČÍTANIE VÝSLEDKOV

Prečítajte si pozorne a dodržujte pokyny v časti **Dôležité informácie pred používaním zariadenia** a v časti **Nasadenie manžety na rameno**.

Pri meraní nerozprávajte a nehýbte sa.

Tlakomer je určený na meranie a ukladanie nameraných údajov do pamäte pre 2 osoby definované ako P1 a P2.

Model má pamäť pre 2 osoby na 90 meraní.

- 1 Pri prvom použití stlačením tlačidla **SET**, keď je zariadenie vypnuté, zobrazíte výzvu na zadanie identifikátora P1 (osoba 1) alebo P2 (osoba 2) pre merania.

Výber vykonajte tlačidlom  alebo . Pred vykonaním merania alebo zobrazením pamäte sa ubezpečte, že ste pred spustením zariadenia zadali správny identifikátor (P1 alebo P2), ktoré ste registrovali.

- 2 Stlačte tlačidlo . Prístroj na meranie tlaku začne pracovať a prebehne kontrola funkcií. Všetky funkcie budú na displeji zobrazené cca 3 sekundy (číslice 8).

Potom symboly na displeji zmiznú a začne blikať symbol merania tlaku a manžeta sa natlakuje na 195 mmHg.

Ak je meraný tlak vyšší, manžeta sa natlakuje na vyšší tlak. Počas merania sa nehýbte ani nerozprávajte.

- 3 Keď sa dosiahne správna úroveň natlakovania manžety, začne sa jej automatické pomalé vypúšťanie. Pri vypúšťaní manžety sa na displeji zobrazia klesajúce čísla. Symbol srdca bude blikať na základe priebehu oscilačných signálov (pulzu).

- 4 Po dokončení merania sa vypustí zostávajúci vzduch. Na displeji budú zobrazené hodnoty systolického a diastolického tlaku v mmHg a čierny bod na farebnej indikácii, či je Váš tlak nízky, normálny alebo vysoký. Zároveň sa zobrazí aj srdcová frekvencia (pulz/min.). Ak sa počas merania zaznamenala srdcová arytmia, bude po meraní blikať indikátor arytmie (♥). Po určitom čase sa zobrazenie a tlakomer vypnú.

Poznámka

Pred začatím ďalšieho merania tlaku krvi počkajte 2 - 3 minúty. Tento čas je potrebný na obnovenie krvného obehu. V závislosti od Vašich individuálnych fyziologických dispozícií môžete medzi jednotlivými meraniami potrebovať dlhší oddychový čas.

UKLADANIE VÝSLEDKOV MERANÍ

Výsledky každého merania (hodnoty systolického a diastolického tlaku, pulz a dátum a čas merania) sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja.

Prístroj dokáže v pamäti uchovať výsledky až posledných 90 meraní pre používateľa P1 aj P2. Pri uložení 91. merania dôjde k vymazaniu výsledkov z najstaršieho (1.) merania.

Vyvolanie výsledkov meraní z pamäte

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo . Ak v databáze nie sú uložené žiadne výsledky merania, zobrazí sa "0".
Ak sú v databáze uložené výsledky meraní, na určitý čas sa zobrazí výsledok posledného merania (hodnoty systolického a diastolického tlaku, pulz a dátum a čas merania) pre zvoleného používateľa.
- 2 Stláčaním tlačidla  alebo  zobrazujete ďalšie údaje z pamäte.
Poznámka
Namerané a uložené hodnoty môžete skontrolovať s Vaším lekárom.
- 3 Ak chcete ukončiť čítanie uložených údajov, stlačte tlačidlo .

Vymazanie výsledkov meraní z pamäte

- 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo  alebo  počas zobrazenia údajov z pamäte, kým sa všetky hodnoty nezmenia na 0.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

A ZOBRAZOVANÉ SYMBOLY

Indikátor/ problém	Stav/príčina	Riešenie
	Slabé batérie	Vymeňte batérie.
	Indikátor bliká po nameraní pulzu.	Srdcová arytmia počas merania. Skúste zopakovať meranie.
Abnormálne výsledky	Ramenná manžeta je príliš voľne nasadená.	Ramennú manžetu riadne nasadíte.
	Pohyb alebo rozprávanie pri meraní.	Počas merania sa nehýbte a nerozprávajte.
	Manžeta zavadzia nejaká časť odevu.	Vyzlečte si odev, ktorý prekáža manžete.

Indikátor/ problém	Stav/príčina	Riešenie
Er U	Nedostatočné nafúknutie.	Zopakujte meranie.
Er H	Prefúknutie nad 305 mmHg	Zopakujte meranie.
Er 1	Nezmeral sa pulz.	Zopakujte meranie.
Er 2	Rušenie žiarením.	Odstráňte zdroj rušenia.
Er 3	Chybné meranie.	Zopakujte meranie.

ÚDRŽBA

Upozornenia

- Nerozoberajte prístroj.
- Chráňte prístroj pred silnými nárazmi.
- Chráňte prístroj pred vysokými teplotami a slnečným žiarením.
- Neponárajte prístroj ani manžetu do vody.
- Ak je prístroj uložený pri teplote pod bodom mrazu, nepoužívajte ho ihneď. Pred použitím ho ponechajte minimálne jednu hodinu na teplom mieste.
- Manžetu neperte ani nenamáčajte.
- Nečistite monitor prchavými tekutinami.
- Ak nepoužívate monitor po dlhšiu dobu, vyberte batérie z prístroja.

Kalibrácia

- Tento merač krvného tlaku sa koncipuje pre dlhodobú činnosť a jeho presnosť sa dôsledne testuje.
- Vo všeobecnosti odporúčame toto zariadenie nechať vykonať kalibráciu zariadenia po dvoch rokoch používania.

Čistenie

Na čistenie povrchu prístroja použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku.

Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Ramennú manžetu vyčistíte mäkkou a suchou handričkou alebo mäkkou a navlhčenou handričkou a neutrálnym mydlom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú schválené výrobcom, budú mať za následok stratu záruky.

Prístroj a súčasti nerozoberajte a nepokúšajte sa ich opraviť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Oblasť merania:	rameno
Metóda merania:	oscilometrická metóda s tzv. „fuzzy“ meraním
Displej:	digitálny LCD displej (82 x 92mm)
Rozsah tlakovania:	0 až 305 mmHg
Rozsah merania:	tlak: 40 až 280 mmHg pulz: 30 až 160x/minútu
Presnosť:	tlak: ± 5 mmHg pulz: $\pm 5\%$
Pamäť nameraných hodnôt:	90 meraní pre každého užívateľa (2 osoby)
Natlakovanie manžety:	automatické
Vypúšťanie manžety:	automatické
Rýchle vypúšťanie tlaku:	automatické
Rozmery:	134 x 110 x 66,7 mm (h x š x v)
Hmotnosť:	cca 306 g (bez batérií)
Rozmer manžety:	cca 600 x 140 mm
Obvod manžety:	cca 220 - 480 mm
Zdroj napájania batérie:	4 alkalické batérie, 1,5 V (veľkosť AA)
Zdroj napájania adaptér:	sieťový USB adaptér 5V/500 mAh (nedodávaný)
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:	príložna časť typu B 
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:	trieda I. pri napájaní z vnútorného zdroja energie (batérie) trieda II. pri napájaní z vonkajšieho zdroja energie (adaptér)

Batériový manažment:
Prevádzková teplota:
Prevádzková vlhkosť:
Skladovacia teplota:
Skladovacia vlhkosť:
Dodávané príslušenstvo:

indikátor vybitej batérie
5 až 40 °C
menej než 85 %
-20 °C až 60 °C
menej než 95 %
návod na použitie, USB
kábel, manžeta, cestovné
puzdro

Právo na zmeny vyhradené.



0598

Tento prístroj spĺňa požiadavky európskej smernice 93/42/EEC.



Dátum výroby je vyznačený na typovom štítku zariadenia.



Výrobca:

FUDAKANG INDUSTRIAL Co., LTD

No. 8 Yinghe Road, Yuanjiangyuan
Management Zone, Changping Town
Dongguan City, Guangdong, China



Spĺnomocnený zástupca pre EÚ:

FANTRONIC COMPOSANTS

Rue Jacques Laurent Za Sud – Est. –
BP1185150 Le Monte Achard, France
+33 2510 88920

Distribútor:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odnieť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, v službe pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.